

PrimeLine® PRO КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

Перед каждым применением необходимо проверять все составляющие контейнера для стерилизации на наличие повреждений. Для обеспечения надлежащего функционирования контейнеров необходимо соблюдать указания и рекомендации, представленные в инструкции по применению. В случае отсутствия инструкции по применению обратитесь, пожалуйста, к представителю AESCULAP®

1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ НЕ ДЕФОРМИРОВАНЫ



- Проверьте корпус контейнера и крышку и убедитесь, что...




- нет сколов в области кромки корпуса контейнера,



- нет сколов в области кромки крышки,
- алюминиевая крышка не деформирована.

2. ЦЕЛОСТНОСТЬ СИЛИКОНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ

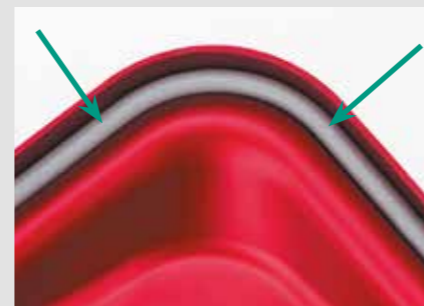

- Убедитесь, что силиконовые уплотнители находятся на своем месте и не повреждены (нет трещин, разрывов и т.д.)

3. ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА



- Снимите защитную крышку для проверки фильтра (снятие — против часовой стрелки, установка — по часовой стрелке) и убедитесь, что...



- фильтр PRIMEline® не поврежден (нет загибов, дырок, трещин, разрывов),
- во время проверки фильтр может оставаться в держателе

4. МЕХАНИЗМ ЗАМКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ



- Убедитесь, что треугольники совпадают (положение фиксации)



- Механизм замка должен быть без повреждений и в полном рабочем состоянии
- Рекомендуется периодически смазывать шарниры замкового механизма маслом Sterilit (JG600)



- Сопоставьте крышку и корпус



- При закрытии замков раздается щелчок

6. ПРОВЕРКА РУЧЕК КОНТЕЙНЕРА



- Убедитесь, что ручки на корпусе не повреждены

7. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ



- Используйте только неповрежденные стерилизационные контейнеры
- При обнаружении поврежденных элементов замените их оригинальными запасными частями или отправьте контейнер в ремонт



8. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВКА



- Стерилизационный контейнер закрыт
- Установлена этикетка-пломба и/или пластиковая пломба



Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукции