

# Basis КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

Перед каждым применением необходимо проверять все составляющие контейнера для стерилизации на наличие повреждений. Для обеспечения надлежащего функционирования контейнеров необходимо соблюдать указания и рекомендации, представленные в инструкции по применению. В случае отсутствия инструкции по применению обратитесь, пожалуйста, к представителю AESCULAP®


### 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ НЕ ДЕФОРМИРОВАНЫ



- Проверьте корпус контейнера и крышку и убедитесь, что...



- нет сколов в области кромки корпуса контейнера,

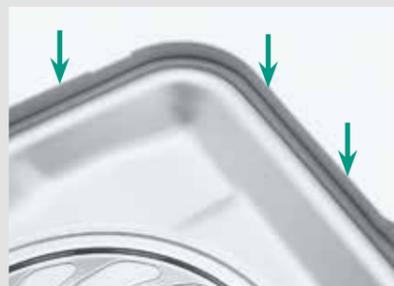

- нет сколов в области кромки крышки,
- алюминиевая крышка не деформирована

### 2. ПРОВЕРКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ФИЛЬТРА



- Поместите держатели на ровную горизонтальную поверхность и убедитесь, что края держателей плотно прилегают к поверхности



- Убедитесь, что силиконовые уплотнители находятся на своем месте и не повреждены



- Не должно быть люфта в области соединения фиксирующего штифта с крышкой и/или с корпусом (для корпусов JN)

### 3. ЦЕЛОСТНОСТЬ СИЛИКОНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ



- Убедитесь, что силиконовые уплотнители находятся на своем месте и не повреждены (нет трещин, разрывов и т.д.)

### 4. ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА



- Фильтр не поврежден (нет загибов, дырок, трещин, разрывов)
- Одноразовый фильтр заменен



- При установке держателя фильтра раздается отчетливо слышимый щелчок

### 5. МЕХАНИЗМ ЗАМКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ



- Механизм замка должен быть без повреждений и в полном рабочем состоянии
- Рекомендуется периодически смазывать шарниры замкового механизма маслом Sterilit (JG600)



### 6. ПРАВИЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ



- Сопоставьте крышку и корпус

### 7. ПРОВЕРКА РУЧЕК КОНТЕЙНЕРА



- При закрытии замков раздается отчетливо слышимый щелчок



- Убедитесь, что ручки на корпусе не повреждены

### 8. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ



- Используйте только неповрежденные стерилизационные контейнеры
- При обнаружении поврежденных элементов замените их оригинальными запасными частями или отправьте контейнер в ремонт



### 9. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВКА



- Стерилизационный контейнер закрыт
- Установлена этикетка-пломба и/или пластиковая пломба



Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукции