

AESCLAP Aicon® КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

Перед каждым применением необходимо проверять все составляющие контейнера для стерилизации на наличие повреждений. Для обеспечения надлежащего функционирования контейнеров необходимо соблюдать указания и рекомендации, представленные в инструкции по применению. В случае отсутствия инструкции по применению обратитесь, пожалуйста, к представителю AESCULAP®


1. ПРОВЕРКА КРЫШКИ



- Проверьте крышку на отсутствие вмятин и деформаций



- Убедитесь, что силиконовый уплотнитель не поврежден (нет трещин, разрывов и т.д.)

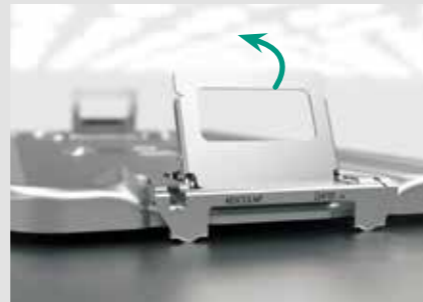

- Убедитесь, что замковый механизм не имеет повреждений и полностью функционален


2. ПРОВЕРКА ДЕРЖАТЕЛЯ ФИЛЬТРА



- Проверьте держатель фильтра на отсутствие вмятин и деформаций



- Убедитесь, что силиконовый уплотнитель не поврежден (нет трещин, разрывов и т.д.)

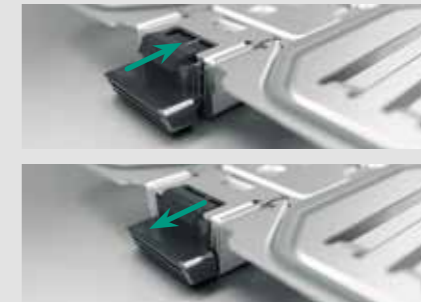

- Убедитесь, что кнопки замкового механизма полностью функциональны



- Вставьте новый фильтр (без перегибов, отверстий, трещин, разрывов)



- При установке держателя фильтра слышен отчетливый щелчок; держатель полностью прилегает к поверхности



- Проверьте корпус на отсутствие вмятин и деформаций



- Проверьте ободок корпуса на отсутствие вмятин и деформаций



- Выньте модули устройства для отвода конденсата для проверки



- Убедитесь, что силиконовые уплотнители (на корпусе и в центре модуля) не повреждены



- Поместите модули обратно (при установке слышен отчетливый щелчок)



- Синяя точка снаружи указывает на то, что модуль устройства для отвода конденсата установлен правильно



- Закройте и опломбируйте контейнер. Используйте только неповрежденные контейнеры. При обнаружении поврежденного элемента произведите замену или направьте в ремонт



- Контейнер для стерилизации готов к использованию

САЙТ



Отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную информацию о продукции